

ANIMALINTEX

Cataplasme vétérinaire

ANIMALINTEX est un pansement à usages multiples, en trois couches:

- **Voile non tissé** : non adhérent pour préserver le bourgeon cicatriciel.
- **Coton + acide borique + Tragacathe** : coton de qualité supérieure pour une meilleure absorption, contenant un antiseptique doux et un gel drainant.
- **Face externe en polyéthylène** : protection imperméable contre les agressions extérieures, maintient à la bonne température du cataplasme.



Utilisations

ANIMALINTEX est une cataplasme s'utilisant sec, à froid ou à chaud.

- **A sec** : pouvoir hautement absorbant. Il est donc particulièrement recommandé sur les plaies suintantes.
- **A froid** : le froid a un pouvoir de vasoconstriction favorable lors de fourbure ou de saignement. Il joue aussi un rôle analgésique (apaise la douleur) et s'utilise donc sur les tendinites, les elongations ou les suros.
- **A chaud** : la chaleur provoque la vasodilatation, responsable d'un meilleur apport en globules blancs et en oxygène, favorable à une bonne cicatrisation. Le chaud favorise également la perméabilité vasculaire, pour un meilleur drainage. S'utilise donc notamment lors d'abcès, seime, cloue de rue, lymphangite, mollettes, escarres.

Ne contient pas d'ingrédient dopant

Mode d'emploi

Nettoyer la peau avant la pose du cataplasme. Couper ANIMALINTEX à la taille désirée.

ANIMALINTEX se place avec le film plastique transparent vers l'extérieur (voile non tissé au contact du cheval). Maintenir ANIMALINTEX avec la bande cohésive EQUIWRAP. S'assurer que le cataplasme est bien couvert par la bande.

En pansement sec

ANIMALINTEX s'applique directement sur la peau.

En cataplasme froid

Placer ANIMALINTEX dans un récipient propre, face plastique vers le haut. Verser de l'eau froide (sérum physiologique ou eau préalablement bouillie puis refroidie). Lorsque le cataplasme est saturé, retirer doucement ANIMALINTEX et laisser s'écouler le liquide excédentaire (le cataplasme doit être humide, mais pas gorgé d'eau). Mouler le cataplasme autour du corps du cheval.

En cataplasme chaud

Suivre la méthode indiquée ci-dessus avec de l'eau tiède (38°C environ).

S'utilise aussi dans les bandages trois couches (Pansement Animalintex, rembourrage coton Gamgee, bande cohésive Equiwrap).

Présentation

Sous emballage individuel, en boîte-présentoir de 10 cataplasmes de 40 cm x 21 cm.

ACL 7116438

